

Instrucciones para la obtención de muestras de líquido bucal con Oral-Eze®


Instrucciones de autoobtención para pacientes para pruebas solicitadas por médicos*, en casos en que no se puedan realizar obtenciones presenciales

Preparación de la autoobtención

- Seleccione un lugar limpio y seco para obtener la muestra. Revise estas instrucciones por completo.
- Acumule saliva en su boca durante un minuto.
- Retire la goma de mascar, cualquier alimento o cigarrillo de su boca antes de la prueba. Si su boca no está vacía, enjuáguela con agua y espere por 10 minutos.
- No abra el paquete de obtención de muestras Oral-Eze en este punto. El paquete incluye una paleta de plástico y un tubo de obtención de muestras de plástico que contiene un líquido. La paleta tiene una almohadilla de algodón en un extremo y un mango plástico en el otro. Hay un visor redondo en el mango.


Paso 1 Abra la caja y retire los artículos del interior, dejándolos separados. Abra el paquete de obtención de muestras Oral-Eze lo suficiente como para tomar fácilmente el mango de la paleta. Retire la paleta tomándola desde el mango de plástico. Tenga cuidado de no tocar la almohadilla de algodón.

Figura 1

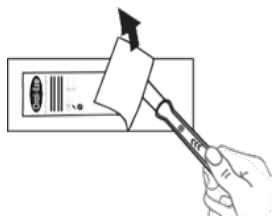


Paso 2 Coloque la paleta en su boca entre la parte inferior de la mejilla y la encía, con la almohadilla de algodón orientada hacia las encías o dientes. La almohadilla de algodón no debe quedar orientada hacia la mejilla. El visor redondo debe estar orientado hacia el centro de la boca.

Figura 2

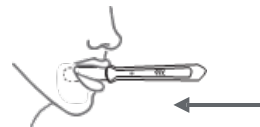

Paso 3 Establezca un temporizador en 10 minutos. Mantenga la almohadilla en su boca. No mastique ni succione la almohadilla. Cuando el visor del mango de la paleta se vuelva azul O el temporizador llegue a 10 minutos, la obtención se habrá completado. Puede retirar la paleta y volver a insertarla para revisar el visor.

Figura 3

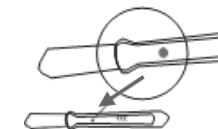

Paso 4 Mantenga la paleta en su boca. Ahora, retire el tubo de plástico con líquido del paquete de obtención Oral-Eze. Sostenga el tubo en posición vertical y gire la tapa para abrirla.

Figura 4



Paso 5 Retire la paleta de su boca y, mientras sostiene el tubo plástico abierto, coloque la almohadilla de algodón en la abertura del tubo plástico. Coloque su pulgar en los bordes del mango de plástico y deslice hacia delante para quitar la almohadilla de la paleta y lograr que caiga en el tubo. Si la almohadilla no cae de inmediato en el tubo, presione suavemente la almohadilla contra el costado del tubo hasta que caiga.

Figura 5



Paso 6 Una vez que la almohadilla de algodón esté dentro del tubo, cierre bien la tapa del tubo de obtención de muestras.

Figura 6



Oírás un "clic"

Si tiene preguntas sobre el paquete de autoobtención de muestras Oral-Eze®, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Para ver una demostración en video, visite el siguiente sitio: <https://www.questdrugmonitoring.com/resources>

*Uso previsto: el dispositivo de obtención de muestras Oral-Eze® se suministra como parte de una prueba solicitada por su proveedor de atención médica. Este sistema de obtención de líquido bucal Oral-Eze® está diseñado para que las personas, con la supervisión de profesionales capacitados, lo utilicen para obtener, guardar y preservar muestras de líquido bucal después de su obtención y durante el transporte desde el área de obtención hacia el laboratorio. Estas instrucciones son válidas para los casos en que no se puedan realizar obtenciones presenciales.

—Consulte el reverso de este documento para ver las instrucciones de embalaje y envío—


Instrucciones para la obtención de muestras de líquido bucal con Oral-Eze®

Instrucciones de embalaje y envío: obtención y envío de la muestra el mismo día

Paso A Asegúrese de que el tubo de obtención de muestras esté sellado correctamente.

Figura A

Pegue la etiqueta aquí

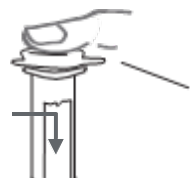

Oírán un "clic"

Paso B Anote la información de la fecha de la obtención en el formulario de laboratorio proporcionado.

Figura B


Fecha de la obtención



Paso C Quite la etiqueta (sección inferior desprendible del formulario de laboratorio) y péguela en el tubo de obtención de muestras, a lo largo del centro del tubo de obtención de muestras. (Figura C, A)

Figura C


Quite la etiqueta (sección inferior del formulario)

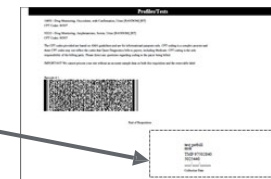

Paso D Coloque el tubo de obtención de muestras dentro de la bolsa para muestras proporcionada, en la sección principal de la bolsa.

Figura D

El formulario se guarda aquí

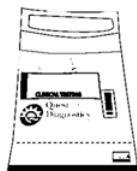

Paso E Doble a la mitad el formulario de laboratorio completado y colóquelo dentro de la bolsa para muestras, en la sección del bolsillo más pequeño. (Figura E, D)

Figura E

Doble aquí



Paso F Cierre presionando firmemente el adhesivo de la bolsa para muestras e insértela en la caja de envío proporcionada.

Figura F

Inserte la bolsa para muestras



Paso G Cierre la caja de envío con el sello proporcionado y pegue la etiqueta de envío "Return" (Devolución) proporcionada en la caja de envío sellada (sobre la etiqueta actual).

Figura G

Fije la etiqueta de envío de devolución (sobre la etiqueta actual)



Paso H Coloque la caja de envío etiquetada en una caja de entrega de FedEx adecuada o déjela en un centro de recolección de FedEx correspondiente.

Figura H



Si tiene preguntas sobre el paquete de autoobtención de muestras Oral-Eze®, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Para ver una demostración en video, visite el siguiente sitio: <https://www.questdrugmonitoring.com/resources>

QuestDiagnostics.com

Quest, Quest Diagnostics, los logotipos asociados y todas las marcas comerciales registradas o no registradas asociadas de Quest Diagnostics son propiedad de Quest Diagnostics. Todas las marcas de terceros, ® y ™, son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Quest Diagnostics Incorporated. Todos los derechos reservados. PP9966-SP 1/2021



—Consulte el reverso de este documento para ver las instrucciones de autoobtención—